

# NÁVOD K POUŽITÍ

## Respirátor N95 (FFP2)

Slouží jako ochrana dýchacích cest nositele. Ochranná maska filtrující částice, zamezí přenosu kapének, prachu a znečištění ze vzduchu.

Určen pro jednorázové použití.

### Návod k použití:



Respirátor je nutno správně nasadit dle návodu.

1. Vyjměte masku z obalu.
2. Přiložte ji k obličeji a za pomoci gumiček umístěte za uši.
3. Vytvarujte kovový pásek okolo nosu.
4. Masku upravte tak, aby těsně zakrývala nos a bradu.

Respirátor by měl těsnit po celém svém obvodu, čehož lze dosáhnout dostatečným utážením gumiček.

Během používání respirátoru si nesahejte na oči ani obličej. Nečistoty a viry mohou vniknout do těla také přes oční sliznici.

Při snímání masky se nedotýkejte její vnější plochy, uchopte ji za gumičky a sejměte. Použitou masku vyhodte do odpadu. Poté si pečlivě umyjte ruce vodou a mýdlem případně použijte dezinfekci.

Doba použitelnosti: 2 roky

Datum výroby uveden na obale výrobku.

Skladování: uchovejte v suchu

Výrobce: Xinxiang Kangmin Sanitary Material CO., Ltd.

Adresa: Dingluan Industry Area, Changyuan City Henan Province, China.